

Hepatitis B Virus Core Antigen

KN VKTRO DKYAGNOSTKK

KULLANIM AMACI: VÁcut děíě tēbbŋ teíhi s

Bu ÁrÁn Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiġ, ile g¼rÁntÁlenecek kalitatif immÁnohistokimya iġin t

AÇIKLAMA :

İŞµİÚÚÚ . ΦΩοΟσ Ξűo İÚÚΛŞΩΩ ΩΨ íİµΘŚİ ΞΟc
27 nm'lik kēsmen ġift sarmallē bir DNA ġekirdeki iġe
hepatit B ġekirdek antiġeni denir. Dēí yÁzeydeki ant

KATALOG NO : PL2028

PL2028-R7 7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST

PL2028-R1 1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST

PL2028-1 1 ML KONS. 1/100 1000 TEST

PL2028-0,1 0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST

BOYANMASI GEREKEN ALAN : Nűkleer

POZİTİF KONTROL: proteini iġerdiġi bilinen ¼rnek.

AMBALAJ: 7 ml Kullanēma Hazēr (0.05mol / L Tris - HCl , pH
iġeren seyreltilmiġ 7 ml antikor.)

KAYNAK: Tavían

KLON: Poliklonal

ANTİKOR KONSANTRASYONU : ASİMDON

TÜR REAKTİVİTESİ : 5Ω~ŞoPŞoΩ úŞσú ŞŚΩPΨŚŚΩ

EPİTOP Bilinmiyor

MİKROBİYOLOJİK DURUM: steril deġildir.

ÖN İŞLEM: malinle sabitlenmiġ doku kesitlerinin boyalı
iġinde 10-20 dakika muamele edilmesini ve ardından o

PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ: 60 dakika

BOYAMA İPUÇLARI: Boyanma ġok aġēksa, daha dÁíÁk seyreltme
Eġer boyanma ġok gÁġıyse, ¼n iġlemi kontı
daha kēsa sÁre kullanēn.

SAKLAMA VE STABİLİTE: sodyum azid iġerir ve 2-8ÁC'de
etiketinde belirtilen son kullanma tar
¼nerildiġi íekilde saklanmazsa, perfor

SORUN GİDERME: f:en e-posta ile Patolab Teknik Destek