

## Fli-1

## IN VITRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

**KULLANIM AMACI :** Vücut dışı tıbbî teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır.

**AÇIKLAMA :** Fli-1 olarak tanımlanan 51 kDa'lık bir proteini tanıır. DNA bağlayıcı transkripsiyon faktörleri ETS ailesinin bir üyesi olan bu protein, hücrel proliferasyon ve tümör oluşumunda rol oynar. Ets-1, E26 eritroblastoz virüsünden izole edilen v-Ets onkogenine homologisine dayanarak tanımlanan bir gen ailesinin prototip üyesidir. Ets gen ailesinin üyeleri, SV40 büyük T antijeni nükleer lokalizasyon sinyal dizisiyle ilişkili bir dizi içeren oldukça korunmuş bir karboksi-terminal alanı paylaşır.

|                     |        |            |                              |
|---------------------|--------|------------|------------------------------|
| <b>KATALOG NO :</b> | PL2029 | PL2029-R7  | 7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST |
|                     |        | PL2029-R1  | 1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST |
|                     |        | PL2029-1   | 1 ML KONS. 1/100 1000 TEST   |
|                     |        | PL2029-0,1 | 0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST  |

**BOYANMASI GEREKEN ALAN :** Çekirdek

**POZİTİF KONTROL :** Viroz sarkomu/PNET, lenfoblastik lenfoma, lenfositler, endotel hücreleri, anjiyosarkom, Kaposi sarkomu

**AMBALAJ :** 7 ml Kullanıma Hazır ( 0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor. )

**KAYNAK :** Tavşan

**KLON :** ZR217

**ANTİKOR KONSANTRASYONU :** 1:1000

**TÜR REAKTİFİ :** İnsan Eşleri test edilmedi.

**EPI TOP :** Bilinmiyor

**MİKROBİYOLOJİK DURUM :** Bu ürün steril değildir.

**ÖN İŞLEM :** Formalinle sabitlenmiş doku kesitlerinin boyanması, doku kesitlerinin kaynayan sitrat, pH 6.0 içinde 10-20 dakika muamele edilmesini ve ardından oda sıcaklığında 20 dakika soğutulmasını gerektirir.

**PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ :** 1 saat 37°C'de

**BOYAMA İPUÇLARI :** Boyama çok açıksa, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın.  
Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

**SAKLAMA VE STABİLİTE :** Bu ürün 5% sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

**SORUN GİDERME :** Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin