

TLE1

İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

KULLANIM AMACI : Vücut dışı tıbbî teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır.

AÇIKLAMA : Notch yolundaki kilit oyuncular, Drosophila Groucho geninin insan homologları olan TLE genleridir. Groucho, nörogenez, segmentasyon ve cinsiyet belirlemede önemli rol oynayan bir transkripsiyonel baskılayıcıdır. Transdusin benzeri güçlendirici protein 1 (TLE1), TLE1 geni tarafından kodlanan ve hematopoez, nöronal ve terminal epitelyal farklılaşmanın kontrolünde rol oynayan bir proteindir. Anti-TLE-1 ile pozitif immünohistokimyasal nükleer boyama, sinovyal sarkomu diğer yumuşak doku malignitelerinden ayırırken IHC paneline faydalı bir ek olarak gösterilmiştir.

KATALOG NO :	PL2034	PL2034-R7	7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
		PL2034-R1	1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
		PL2034-1	1 ML KONS. 1/100 1000 TEST
		PL2034-0,1	0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST

BOYANMASI GEREKEN ALAN : Çekirdek

POZİTİF KONTROL : Sinovyal sarkom

AMBALAJ : 7 ml Kullanıma Hazır (0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein, 0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor.)

KAYNAK : Tavşan

KLON : ZM93

ANTİKOR KONSANTRASYONU : Bilinmiyor

TÜR REAKTİVİTESİ : İnsan. Diğerleri test edilmedi.

EPİTOP : Bilinmiyor

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ürün steril değildir.

ÖN İŞLEM : Formalinle sabitlenmiş doku kesitlerinin boyanması, doku kesitlerinin kaynayan sitrat, pH 6.0 içinde 10-20 dakika muamele edilmesini ve ardından oda sıcaklığında 20 dakika soğutulmasını gerektirir.

PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ : Oda ısısında 60 dakika

BOYAMA İPUÇLARI : Boyanma çok açıksa, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın.
Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

SAKLAMA VE STABİLİTE : Bu ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

SORUN GİDERME : Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin