

Faktör 13A

İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

KULLANIM AMACI : Vücut dışı tıbbî teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır.

AÇIKLAMA : Faktör XIII'ün hem indirgenmiş hem de indirgenmemiş formları. İnsan Faktör XIII B zinciri veya insan Faktör XII ile reaksiyona girmez. Faktör XIII, plazmada bulunan bir Beta-globulindir ve iki alt birimden oluşur. Faktör XIII-A, katalitik alt birimdir ve M.W.'nin bir dimeridir. Faktör XIIIa bir dermal dendrosit belirticidir ve bu tip tümörlerle değişken reaksiyon gösterir.

KATALOG NO : PL1237

PL1237-R7 7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST

PL1237-R1 1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST

BOYANMASI GEREKEN ALAN : Sitoplazmik ve Nükleer

PL1237-1 1 ML KONS. 1/100 1000 TEST

PL1237-0,1 0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST

POZİTİF KONTROL : Rekombinant insan Faktör XIII A alt birimi. Kılcal hemanjiyom, dermatofibrom.

AMBALAJ : 7 ml Kullanıma Hazır (0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor.)

KAYNAK : Fare

KLON : AC-1A1

ANTİKOR KONSANTRASYONU : 200ug / ml

TÜR REAKTİVİTESİ : İnsan. Diğerleri test edilmedi.

EPİTOP : Belirlenmemiş.

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ürün steril değildir.

ÖN İŞLEM : Formalinde fikse edilmiş immünohistokimya dokuları için, Özel bir ön işlem gerektirmez

PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ : Oda ısısında 30 dakika

BOYAMA İPUÇLARI : Boyanma çok açıksa, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın.
Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

SAKLAMA VE STABİLİTE : Bu ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

SORUN GİDERME : Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin