

## CD3

## İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

**KULLANIM AMACI :** Vücut dışı tıbbî teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır. Tavşan Monoklonaldır.

**AÇIKLAMA :** Bu antikor, T hücreleri tarafından ifade edilen CD3 antijeninin intrasitoplazmik kısmı ile reaksiyona girer. Timusun hem korteksinde hem de medullasında ve periferik lenfoid dokularda insan T hücrelerini boyar. Bu antikor, formalinle sabitlenmiş, parafine gömülü dokularda normal ve neoplastik T hücrelerinin boyanması için uygundur.

|                                 |            |            |                              |
|---------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| <b>KATALOG NO :</b>             | PL9107     | PL9107-R7  | 7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST |
|                                 |            | PL9107-R1  | 1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST |
| <b>BOYANMASI GEREKEN ALAN :</b> | Hücre zarı | PL9107-1   | 1 ML KONS. 1/200 2000 TEST   |
|                                 |            | PL9107-0,1 | 0,1 ML KONS. 1/200 200 TEST  |

**POZİTİF KONTROL :** Jurkat hücreleri, bademcik

**AMBALAJ :** 7 ml Kullanıma Hazır ( 0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor. )

**KAYNAK :** Tavşan

**KLON :** SP7

**ANTİKOR KONSANTRASYONU :** Bilinmiyor

**TÜR REAKTİVİTESİ :** İnsan. Diğerleri test edilmedi.

**EPİTOP :** 156-168aa

**MİKROBİYOLOJİK DURUM :** Bu ürün steril değildir.

**ÖN İŞLEM :** Formalinle sabitlenmiş doku bölümlerinin boyanması, doku bölümlerinin kaynayan 10 mM sitrat, pH 6.0, içinde 10-20 dk muamele edilmesini ve ardından oda sıcaklığında 20 dakika soğutulmasını gerektirir.

**PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ :** Oda ısısında 30 dakika

**BOYAMA İPUÇLARI :** Boyanma çok açıksa, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın.  
Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

**SAKLAMA VE STABİLİTE :** Bu ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

**SORUN GİDERME :** Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin